

Návod k použití

01 Stáhněte si aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste.




Pro stažení aplikace do mobilu si oskenujte QR kód a postupujte podle instrukcí. Potvrďte aplikaci všechna povolení.



Pro sledování instruktážního videa si oskenujte tento QR kód.

02 Příprava před zavedením senzoru

Otevřete Instara balení. V balení se nachází:

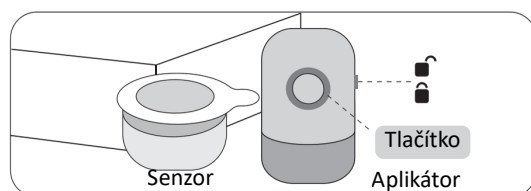


Poznámka

Nezavádějte senzor do podpaží, na poškozenou kůži a do oblastí s výrazným ochlupením.


Zavedení

Pro zavedení si zvolte měkkší oblast na spodní straně paže. Vyčistěte kůži alkoholovým tampónem a nechte ji vyschnout.

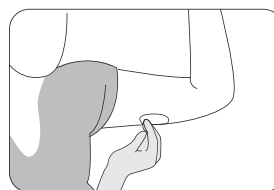


03 Sestavte senzor

Odstraňte hliníkovou fólii ze senzoru.



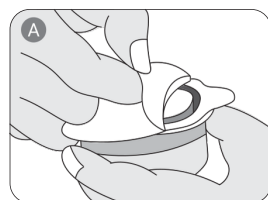


Odstraňte krytku z aplikátoru.

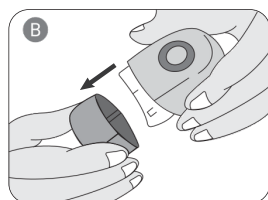

Značka zarovnání


Umístěte senzor na rovný povrch. Přiložte k sobě trojúhelníkové značky, které jsou na senzoru a aplikátoru.

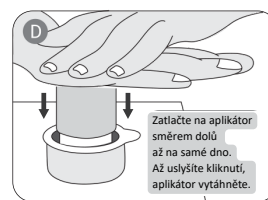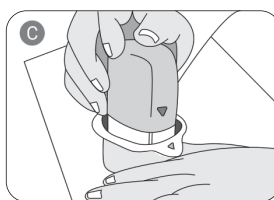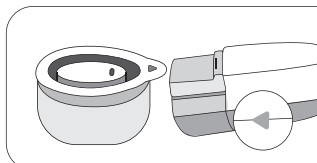

04 Kontrola a potvrzení

Pokud je přelepka a vnitřní strana aplikátoru v rovině (jak je znázorněno na obrázku vpravo ✓), sestavení senzoru proběhlo v pořádku.


Pokud přelepka s vnitřní hranou aplikátoru nelícuje (jak je znázorněno na obrázku vpravo ✗), opakujte prosím znovu postup podle obrázku 3C a 3D.

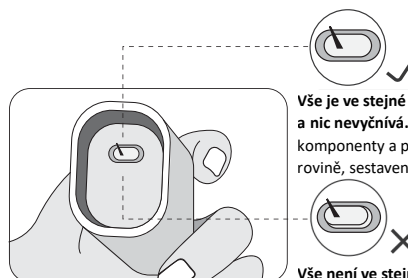


Vše je ve stejné horizontální linii a nic nevyčnívá. Pokud jsou vnitřní komponenty a přelepka ve stejné rovině, sestavení senzoru je v pořádku.

Vše není ve stejné horizontální linii. Pokud nejsou vnitřní komponenty a přelepka v jedné rovině, Pokuste se zopakovat postup podle obrázku 3C a 3D.


05 Aplikace senzoru

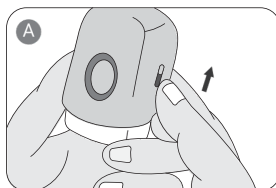

Nastavte pojistku na boku aplikátoru do pozice otevřeného zámku .

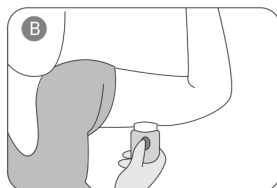

Přiložte aplikátor se senzorem ke kůži a mírně ho přitlačte (důležité).

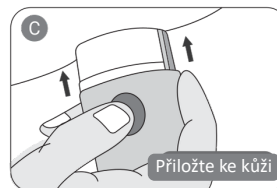


Zmáčkněte tlačítko a senzor se aplikuje.




Odejměte aplikátor a velmi jemně přitlačte na senzor a přelepku kolem, aby byl senzor správně přilepen.

06 Připojení k aplikaci a aktivace senzoru

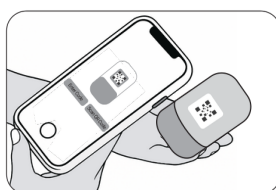


Sledujte instrukce v aplikaci. Pro aktivaci senzoru naskenujte QR kód na zadní straně aplikátoru. Pokud skenování selže, můžete zadat 8 místný kód ručně.

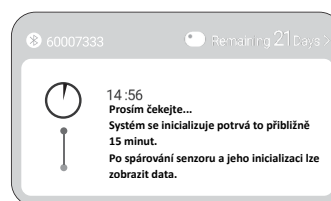


Aktivace (inicializace) senzoru zabere 15 až 30 minut.

07 Nalepte podpůrnou přelepku

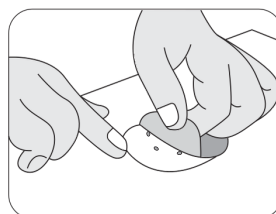

Odstraňte první ochrannou vrstvu.

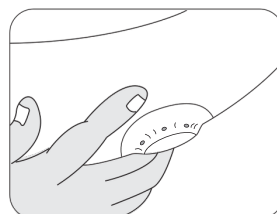

Přilepte přes senzor.

Ventilační průduchy v přelepce by neměly být blokovány. Odstraňte druhou ochrannou vrstvu a přitlačte kolem okrajů, aby přelepka dobře přilnula.

Důležitá poznámka

Někteří lidé mohou být alergičtí na lepení senzoru nebo přelepky. Vyhněte se aplikaci senzoru na stejné místo během krátké doby. Po ukončení použitelnosti senzoru, senzor jemně odlepte.



Dovozce:

MTE spol. s r.o.
Hybešova 43
602 00 Brno
Tel.: 543 432 400
e-mail: mte@mte.cz



Výrobce:

Teljane Medical Technology (Suzhou) Co., Ltd.
5F, Building 2A
69 Jiepu Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou City




EC REP

RIOMAVIX SOCIEDAD LIMITADA
Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain

Zde si můžete stáhnout elektronickou verzi návodu:

https://service.teljane.com/user_manual/quick-guide-en.pdf

Více informací:

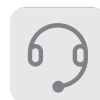

Pokud máte další dotazy i během používání senzoru prosím kontaktujte náš zákaznický tým: service@teljane.com

V 1.01